



### ORIGINAL PRODUCT

**Før du bruger Øjendråbe-brillerne, skal du være opmærksom på følgende:**

- **Følg altid instruktionerne fra din specialist.**
- **Brug kun Øjendråbe-brillerne til at putte dråber i øjnene med passende dråber.**
- **Øjendråbe-brillerne må ikke bruges som sikkerheds-, synsforbedrings-, solbeskyttelses- eller synskorrigerende briller.**
- **Øjendråbe-brillerne er ikke egnede til øjengel.**

#### Manual:

1. Vask dine hænder.
2. Placér doseringsflasken eller -beholderen i en passende åbning af brillerne, så den sidder helt fast.
3. Tag brillerne på.
4. Bøj hovedet, så doseringsflasken er placeret lodret over dit øje.
5. Hold øjet åbent med den ene hånd.
6. Dosér dråberne ved at klemme på flasken med din anden hånd.
7. Skyl brillerne efter brug med vand, alkohol og/eller et desinfektionsmiddel, og tør dem af med en ren klud.

