

NEGLESVAMP BØRSTE

DK FUNGEX NEGLESVAMP BØRSTE

- Dokumenteret effektiv formel mod neglesvamp.
- Dræber svamp på neglen inden for 20 sekunder!
- Forhindrer spredning af infektionen og hjælper med at forhindre geninfektion.

Generelle råd: Før du bruger FungeX Neglesvamp børste, skal du læse instruktionerne omhyggeligt, selvom du har brugt dette medicinske udstyr før. Oplysningerne i en ny pakke kan være blevet revideret for at afspejle den seneste videnskabelige indsigt og data. Ikke desto mindre bør du bruge FungeX Neglesvamp børste med forsigtighed for at opnå gode resultater. Gem disse instruktioner – du skal muligvis bruge dem under behandlingen.

Anvendelse: FungeX Neglesvamp børste er medicinsk udstyr, der hjælper med behandlingen af neglesvamp (onychomycosis). FungeX Neglesvamp børste har vist sig at være effektiv mod neglesvamp infektioner. Den unikke formel, indeholder en 'INSTANT KILLER', der indeholder indholdsstoffer, som trænger ind i neglens overflade og dræber svampen inden for 20 sekunder. Væsken danner et lag på neglen, hvilket skaber et miljø, der er ugunstigt for svampevækst og fungerer som en fysisk barriere for at forhindre spredning af neglesvamp.

For at opnå hurtigere og bedre resultater anbefales det at file neglen omhyggeligt en gang om ugen. Hvis behandlingen stoppes, vil neglesvampen hurtigere vende tilbage. Det er derfor vigtigt at fortsætte med at bruge FungeX Neglesvamp børste, indtil neglesvampen er væk.

Da fugtige omgivelser er en af årsagerne til neglesvamp, anbefales det kraftigt, at du bruger sokker, der udelukkende er lavet af absorberende materialer, såsom bomuld eller uld. Dette er vigtigt, da svamp almindeligvis findes i fugtige omgivelser, hvor de kan formere sig. Hvis du har neglesvamp, er det vigtigt, at du holder dine fødder tørre.

Dosering og brug (kun for voksne): FungeX Neglesvamp børste er kun til ekstern brug. Påfør produktet på det berørte område to gange (f.eks. morgen og aften), indtil neglesvampen er vokset helt ud. Takket være 20-sekunders instant kill-formuleringen bliver applikatorbørsten ikke inficeret med neglesvampen, hvilket forhindrer infektion/geninfektion af de andre negle og beskytter mod eventuel tilbagevenden af svamp. FungeX Neglesvamp børste kan kombineres med brug af tablet behandling (antimykotika).

Virkemåde: Takket være en unik kombination af indholdsstoffer danner FungeX Neglesvamp børste et lag, som skaber et ugunstigt miljø for væksten af svamp i neglepladen. Det danner også en fysisk barriere, der hæmmer spredningen af svamp. FungeX Neglesvamp børste reducerer neglens surhed og skaber et ugunstigt miljø, der stopper vækst og spredning af svamp.

Brug under graviditet og/eller amning: Der er ingen tilgængelig information om brugen af FungeX Neglesvamp børste under graviditet eller ammefasen. Hvis du er gravid eller ammer, skal du kontakte din læge eller apotek, før du bruger det.

Mulige bivirkninger: Mulige bivirkninger omfatter: erytem, irritation, ødem, smerte, neglemisfarvning og onykolyse; allergiske reaktioner.

⚠ ADVARSLER:

- Kun til udvendig brug.
- Neglesvamp kan forårsage erytem, irritation, ødem, smerte, neglemisfarvning og onykolyse.
- Tjek listen over indholdsstoffer for at vide, om du er allergisk over for nogen af indholdsstofferne i gelen.
- Undgå kontakt med øjne eller slimhinder.
- Må ikke påføres åbne sår eller beskadiget hud.
- Undlad at bandagere neglen stramt
- Påfør ikke varme på anvendelsesområdet.
- Gravid eller ammende patienter bør søge lægehjælp inden brug af FungeX Neglesvamp børste.
- Hvis du oplever allergiske reaktioner, skal du stoppe med at bruge produktet.
- Opbevares utilgængeligt for små børn.
- I tilfælde af ingen effekt, kontakt en læge.

Indeholder: 1 FungeX Neglesvamp børste med 5 ml

Ingredienser: Vand, Ethoxydiglycol, ISK1320®, Pentylenglycol, Denatureret alkohol, Tridiceth-9, PEG-40 Hydrogeneret Ricinusolie, Benzylalkohol, Limonen, Glycerin, NatiLact, Propylenglycol, PVP, Xanthangummi, Eucalyptus Globulus blad olie, Lavandula Hybrida olie, Linalool, Dimethyl Isosorbid, Citrus Aurantium Dulcis olie, Pogostemon Cablin olie, Dinatriumphosphat, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citronsyre, Farnesol.

Alle henvendelser om produktet skal sendes til distributøren. For mere information om FungeX Neglesvamp børste, besøg venligst www.fungex.com

FungeX er et registreret varemærke tilhørende TheOTCLab. FungeX Neglesvamp børste er et klasse 2A medicinsk udstyr i henhold til EU-forordning 93/42/EC.

🗑 Anvend ikke produktet efter udløbsdato (se pakken).

Sidst revideret september 2023

DISTRIBUTØR

Bräuner FMCG
Birkmosevej 20D, 1. th.
6950 Ringkøbing
Danmark
www.fungex.dk

PRODUCENT

PK Benelux BV
Vluchtoord 17
5406 XP Uden
Holland



074276_V1.2
V9773816_25B1

NAGELSVAMPSBORSTE

SE FUNGEX NAGELSVAMPSBORSTE

- Bevisad effektiv formula mot nagelsvamp.
- Dödar svampen inom 20 sekunder!
- Förhindrar smittspridning och hjälper till att förhindra återinfektion.

Generella råd: Innan du använder FungeX Nagelsvampsborste, läs instruktionerna noggrant, även om du har använt denna medicintekniska produkt tidigare. Informationen i en ny förpackning kan ha reviderats för att återspegla de senaste vetenskapliga insikterna och uppgifterna. Du bör ändå använda FungeX Nagelsvampsborste med försiktighet för att uppnå bra resultat. Behåll dessa instruktioner – du kan behöva hänvisa till dem under behandling.

Användning: FungeX Nagelsvampsborste är en medicinteknisk produkt som hjälper till vid behandling av nagelsvamp (onykomykos). FungeX Nagelsvampsborste har visat sig vara effektiv mot svampinfektioner i nageln. Den unika formeln innehåller ingredienser som penetrerar nageln och dödar svampen inom 20 sekunder. Vätskan bildar ett lager på nageln, skapar en miljö som är ogynnsamt för svamptillväxt och fungerar som en fysisk barriär mot att förhindra spridningen av svampen. För att uppnå snabbare, bättre resultat rekommenderas att noggrant fila nageln en gång i veckan. Om behandlingen stoppas kommer nagelsvampen att återkomma snabbare. Det är därför viktigt att fortsätta att använda FungeX Nagelsvampsborste till dess att nagelsvampen har försvunnit.

Eftersom fuktiga miljöer är en av orsakerna till nagelsvampinfektioner, rekommenderas det därför starkt att du endast bär strumpor gjorda av absorberande material, såsom bomull eller ull. Detta är viktigt eftersom svamp ofta finns i fuktiga miljöer, där de kan föröka sig. Om du har nagelsvamp är det viktigt att du håller fötterna torra.

Dosering och användning (endast för vuxna): FungeX Nagelsvampsborste är endast för utvärtes användning. Applicera produkten på det drabbade området två gånger (exempelvis morgon och kväll) tills nageln har vuxit ut helt. Applikatorborsten blir inte infekterad med nagelsvampen tack vare den antiseptiska formeln som verkar på 20 sekunder. Därigenom förhindras infektion / återinfektion av de andra naglarna och skyddar mot att svampinfektionen kommer tillbaka. FungeX Nagelsvampsborste kan kombineras med användning av orala antimykotika.

Verknings sätt: Tack vare en unik kombination av ingredienser bildar FungeX Nagelsvampsborste en yta, vilket skapar en ogynnsam miljö för tillväxt av svampar i nageln. Det bildar även en fysisk barriär som hämmar spridningen av svamp. FungeX Nagelsvampsborste minskar nagelns surhet, vilket skapar en ogynnsam miljö som stoppar tillväxt och spridning av nagelsvamp.

Användning under graviditet och / eller amning: Ingen information finns tillgänglig om användningen av FungeX Nagelsvampsborste under graviditet eller amning. Om du är gravid eller ammar, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du använder produkten.

Möjliga biverkningar: Hudrodnad, irritation, ödem, smärta, nagelmisfärgning och onykolyt; allergiska reaktioner.

⚠ VARNINGAR

- Endast för utvärtes bruk.
- Nagelsvamp kan orsaka erytem, irritation, ödem, smärta, nagelmisfärgning och onykolyt.
- Kontrollera ingredienslistan för att säkerställa att du inte är allergisk mot någon av ingredienserna i gelen.
- Undvik kontakt med ögon och slemhinnor.
- Applicera inte på öppna sår eller skadad hud.
- Bandagera inte hårt.
- Applicera inte värme på behandlingsområdet.
- Gravida eller ammande patienter bör söka råd från sjukvårdspersonal innan användning av produkten.
- Om du upplever allergiska reaktioner, sluta använda produkten.
- Hålls utom räckhåll för barn.
- Om effekt uteblir, kontakta läkare.

Innehåller: 1 FungeX Nagelsvampsborste 5 ml

Ingredienser: Vatten, Etoxiglykol, ISK 1320®, Pentylenglykol, Alkohol Denat, Tridiceth-9, PEG-40 Hydrerad Ricinolja, Bensylalkohol, Limonen, Glycerin, Natilact, Propylenglykol, PVP, Xanthangummi, Eucalyptus Globulus Bladolja, Lavandinolja, Linalool, Dimetylisosorbid, Citrus Aurantium Dulcis olja, Pogostemon Cablin olja, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citronsyra, Farnesol.

Alla förfrågningar om produkten ska skickas till distributören. För mer information om FungeX Nagelsvampsborste, besök www.fungex.com

FungeX är ett registrerat varumärke som tillhör TheOTCLab. FungeX Nagelsvampsborste är en medicinteknisk produkt av klass 2A enligt EU:s förordning 93/42/EG.

🗑 Använd ej efter utgångsdatum (se förpackning)

Senast revideringsdatum : september 2023

DISTRIBUTÖR

Bräuner FMCG
Birkmosevej 20D, 1. th.
6950 Ringkøbing
Danmark
www.fungex.dk



PRODUCENT

PK Benelux BV
Vluchttoord 17
5406 XP Uden
Holland



074276_V1.2
V9773816_25B1