

ARTICOLO Foglietto Illustrativo	PRODOTTO Anonimi			
DIMENSIONI TOTALI 150 x 210 mm	DIMENSIONI PIEGATO 150 x 35 mm	PASSO	CODICE 00000000	SCALA 1.1
Piega - Testo				
CARTA 000000000	GRAMMATURA gr.	TIPO PRODOTTO -	F.TO BOBINA Ø 00 mm Ø 000 mm	

Edizione	Data allestimento
0	08-10-2019

L'impianto stampa non deve assolutamente essere modificato o danneggiato

Vivesse®



Tilsigtet anvendelse

Vivesse er en gynækologisk creme med en barrierefunktion, der hjælper med at genoprette den fysiologiske pH i skeden og gør det muligt at gendanne optimale betingelser for formering af naturligt forekommende mælkesyrebakterier. Og derved forhindre kolonisering og overvækst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer, der forårsager tilbagevendende infektioner i skeden, såsom Candida albicans, Gardnerella m.fl.

Vivesse lindrer de tegn og symptomer, der ofte er til stede i sådanne tilfælde, såsom rødme, kløe, udflåd og udtynding af slimhinden i skeden.

Vivesse kan anbefales som symptomatisk tillæg til behandling med svampemidler og som barrierecreme, der er nyttig til forebyggelse af tilbagevendende infektioner i skeden.

Pakning

7 tuber indeholdende 5 ml.


Sammensætning

Ærteprotein- og druekerneekstrakt, mælkesyre, squalen, rensset vand, natriumacrylat-copolymer, paraffin, phenoxyethanol, trideceth-polypropyleneglycol, sorbitanoleat, piroctonolamin, maltodextrin.

Brugsanvisning

Indfør Vivesse direkte i skeden ved hjælp af den medfølgende applikator i rygleje ved sengetid.

- Læg dig på ryggen med knæene trukket op.
- Før forsigtigt applikatoren dybt ind i skeden.
- Tryk på stemplet for at indgive al cremen.
- Fjern applikatoren fra skeden.

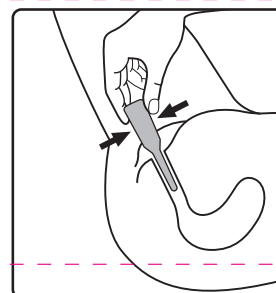

Dosering

En applikation dagligt indtil symptomerne forsvinder.

Advarsler

- Infektion i skeden skal diagnosticeres af en læge. Vi anbefaler derfor, at du kontakter lægen, hvis du er i tvivl om diagnosen, eller hvis du har svære symptomer, er under 14 år eller har andre sygdomme eller risikofaktorer.
- Infektion i skeden kan kræve farmakologisk behandling med et antibiotikum eller et svampemiddel. Dette udstyr er ikke et antibiotikum eller et svampemiddel, eftersom det ikke har nogen bakteriedræbende eller hæmmende virkning eller nogen svampedræbende eller hæmmende virkning mod de sygdomsfremkaldende mikroorganismer, og derfor kan det ikke erstatte en sådan behandling, som lægen har anvist. Hvis der er behov for farmakologisk behandling, kan dette udstyr anvendes samtidig.
- Brug ikke dette produkt under graviditet eller amning. Kontakt først lægen.
- Hvis du får en allergisk reaktion, mens du bruger produktet, skal du straks stoppe med at bruge det og kontakte lægen.
- **Brug ikke produktet efter udløbsdatoen.**
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Må ikke nedfryses.
- Holdes væk fra varme og åben ild.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

Kontraindikationer

Brug ikke Vivesse i tilfælde af overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne i produktet.




DEVINTEC SAGL

Gorso Elvezia 14
6900 Lugano - Switzerland



Devintec Health S.L.

Calle General Pardiñas 99.6ªA.
28006 Madrid - Spain

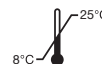

ARTICOLO Foglietto Illustrativo	PRODOTTO Anonimi			
DIMENSIONI TOTALI 150 x 210 mm	DIMENSIONI PIEGATO 150 x 35 mm	PASSO	CODICE 00000000	SCALA 1.1
Piega - Testo				
CARTA 000000000	GRAMMATURA gr.	TIPO PRODOTTO -	F.TO BOBINA Ø 00 mm Ø 000 mm	

Edizione	Data allestimento
0	08-10-2019

L'impianto stampa non deve assolutamente essere modificato o danneggiato

Vivesse®



Tiltenkt bruk

Vivesse er en krem til gynekologisk bruk med en barriereeffekt som bidrar til å gjenopprette den fysiologiske pH-verdien i skjeden og legge til rette for optimale forhold for formering av naturlige melkesyrebakterier. På denne måten kan man unngå kolonisering og overvekst av patogen slik som *Candida albicans*, *Gardnerella* og andre som forårsaker tilbakevendende vaginale infeksjoner.

Vivesse lindrer tegn og symptomer som vanligvis oppstår under slike forhold, som rødhet, kløe, utflod og atrofi.

Vivesse kan anbefales som et symptomatisk tillegg til soppdrepende behandlinger, og som en barriere krem som egner seg til å forebygge tilbakevendende vaginale infeksjoner.

Innhold i esken

7 beholdere som hver inneholder 5 ml.


Sammensetning

Erteprotein og druekjerneekstrakt, melkesyre, skvalen, rensed vann, natriumakrylatkopolymer, parafin, fenoksyetanol, trideceth, polypropylenglykol, sorbitanoleat, piroktonolamin, maltodekstrin.

Bruksanvisning

Anvend Vivesse etter at du har lagt deg i sengen om kvelden. Produktet føres direkte inn i skjeden ved hjelp av applikatoren som følger med.

- Ligg på ryggen med knærne trukket opp.
- Før applikatoren varsomt dypt inn i skjeden.
- Trykk ned stampelet for å skyve ut all kremen.
- Ta applikatoren ut av skjeden.

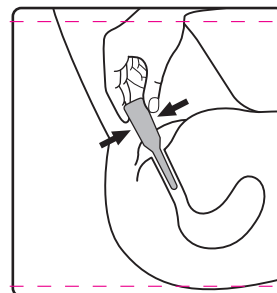

Dosering

En påføring daglig til symptomene forsvinner.

Advarsler

- En vaginal infeksjon må diagnostiseres av helsepersonell. Vi anbefaler derfor at du rådfører deg med lege hvis du er i tvil om diagnosen, eller hvis du har alvorlige symptomer, er under 14 år eller har andre sykdommer eller risikofaktorer.
- En vaginal infeksjon kan kreve medikamentell behandling med antibiotika eller et soppdrepende legemiddel. Dette medisinske produktet er ikke et antibiotikum eller et legemiddel mot soppinfeksjon, da det ikke har en bakteriedrepende, bakteriostatisk eller soppdrepende effekt mot patogenene, og det erstatter derfor ikke en behandling som blir anbefalt av helsepersonell. Ved behov for medikamentell behandling kan dette produktet brukes samtidig.
- Ikke bruk dette produktet under graviditet eller amming. Rådfør deg med legen din først.
- Hvis du utvikler en allergisk reaksjon mens du bruker dette medisinske produktet, må du slutte å bruke det umiddelbart og kontakte lege.
- Ikke bruk produktet etter utløpsdatoen.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet.
- Skal ikke fryses.
- Skal holdes borte fra varme- og lyskilder.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

Kontraindikasjoner

Ikke bruk Vivesse hvis du er overfølsom overfor noen av ingrediensene i produktet.




DEVINTEC SAGL

Gorso Elvezia 14
6900 Lugano - Switzerland



Devintec Health S.L.

Calle General Pardiñas 99.6ªA.
28006 Madrid - Spain

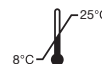

ASP-Vivesse-02-DK-NO Rev 01 22.04.2024