

apotekets

TEST FOR KLAMYDIA TIL MÆND

Apotekets test tager blot nogle få minutter at gennemføre, og testen sendes derefter til analyse i laboratoriet hos Dynamic Code. Du får svar på, om testen indeholder bakterien *C. trachomatis*, som forårsager klamydia.

Det er vigtigt at behandle en påvist infektion hurtigst muligt for at undgå komplikationer.

VIGTIGT

- Vent mindst 7 dage efter det mistænkte smittetilfælde, før du udfører testen.
- Tag om muligt testen med din morgenurin.
- Du må ikke have tisset to timer før testen.
- Udfør ikke testen direkte efter samleje.
- Testen skal udføres med det samme, når testkitemballagen er blevet brudt.
- Testrøret må aldrig åbnes.
- Hvis stemplet på testrøret er trukket ud, må du IKKE skubbe det tilbage. Henvend dig på apoteket, hvor du købte testen og få en ny.
- Hvis testmaterialet er beskadiget, skal det ikke anvendes. Henvend dig på apoteket, hvor du købte testen og få en ny.
- Gem din aktiveringsetiket med analysekoden. Du skal indtaste din analysekode for at få dit testsvar.
- Når du har udført testen skal den opbevares ved stuetemperatur og sendes tilbage hurtigst muligt. Under fragt kan testen klare temperaturvariationer mellem -80 °C og 50 °C.
- Testsvaret er kun gyldigt, hvis testen er taget på den rigtige måde iht. brugsanvisningen.
- Anbefales fra 16 år.

INDHOLD



Brugsanvisning



Testrør indeholdende Guanidinium klorid



Overførselsadapter



Opsamlingsrør



Absorberende pose




Lynlåspose



Aktiveringsetiket med QR-kode og analysekode

BRUGSANVISNING

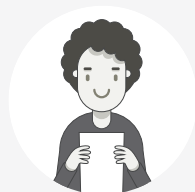

01 GENNEMLÆS BRUGSANVISNINGEN

Læs hele brugsanvisningen igennem, inden du påbegynder testen, så du ikke overser noget vigtigt.



02 SE INSTRUKTIONSFILMEN

Scan QR-koden til venstre eller følg URL:
<https://lambda.dynamiccode.se/redirect?type=sampletypel>
for at se instruktionsfilmen.



03 AKTIVÉR TESTEN


Aktivér din test samme dag, som du udfører testen. Test modtaget uden aktivering kasseres med det samme.

- Tag testrøret frem.
- Riv aktiveringsetiketten af ved den perforerede linje over den gule stribe. Sørg for at resten af etiketten bliver siddende på testrøret, da testen ellers ikke kan identificeres ved ankomsten til laboratoriet.
- Scan QR-koden, der findes på aktiveringsetiketten. Alternativt kan du indtaste analysekoden på www.dynamiccode.com.
- Følg onlineinstruktionerne.
- Gem aktiveringsetiketten.




04 GEM AKTIVERINGSETIKETTEN

Vigtigt! Gem aktiveringsetiketten. Den indeholder din analysekode, som du skal bruge for at hente dit testsvar.

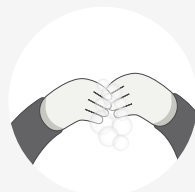


05 VASK HÆNDERNE

Vask og tør hænderne omhyggeligt.

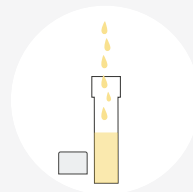


06 OPSAML URIN

Opsaml den første uritmængde, når du tisser, i opsamlingsrøret.

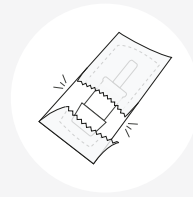


07 FORBERED OVERFØRSELSADAPTEREN

Bryd beskyttelsesemballagen til overførselsadapteren. Lad adapteren blive i beskyttelsesemballagen (se instruktionsfilm).

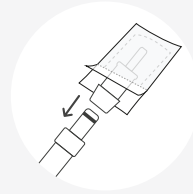

08 FORBERED OVERFØRSEL

Bemærk! Testrøret skal holdes således, at proppen vender opad, se billede. Sæt overførselsadapteren på proppen på testrøret ved at trykke og derefter skrue, så det sidder fast på røret.

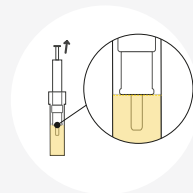

09 FYLD TESTRØRET


Husk, at testrøret aldrig skal åbnes.

- Før overførselsadapteren ned under væskeoverfladen i urinen. Det er vigtigt, at den nederste del af overførselsadapteren er under væskeoverfladen.
- Træk langsomt i det hvide stempel på testrøret, indtil det stopper. Ét træk i stemplet fylder røret med den korrekte mængde urin. Fyld ikke mere urin i.
- Hold overførselsadapteren under væskeoverfladen, indtil den holder op med at fylde. Ved korrekt overførsel vil kun en del af testrøret være fyldt med urin. Testrøret må ikke være fyldt til randen.



10 AFSLUT TESTEN

- Fjern overførselsadapteren fra testrøret, så prøven ikke lækker under transport.
- Knæk stemplet af.
- Bland prøven ved at vende testrøret op og ned 3-4 gange.
- Hæld den overskydende urin ud af opsamlingsrøret, og kassér opsamlingsrøret, overførselsadapteren og stemplet (sorteres som restaffald).

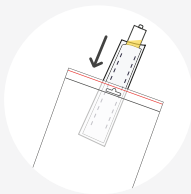

11 FORBERED TESTEN TIL RETURNERING

1. Læg testrøret i den absorberende pose.
2. Læg den absorberende pose med testrøret i lynlåsposen, og luk den til.



13 RETURNÉR TESTEN

Returnér den frankerede æske ved at aflevere den til et PostNord indleveringssted.



12 PAK TESTEN I ÆSKEN

- Kom lynlåsposen med testen ned i æsken.

Vigtigt! Kom ikke aktiveringsetiketten i æsken. Gem aktiveringsetiketten med din analysekode for at hente dit testsvar.

- Fold lågets flapper ind, luk igen, og lås æsken.



14 AFVENT SVAR

Scan QR-koden. Alternativt kan du indtaste analysekoden på www.dynamiccode.com.

QR- og analysekoden findes på aktiveringsetiketten.

Hvis du har indtastet dit telefonnummer, da du aktiverede din test, vil du modtage en SMS-besked, når dit resultat er klar.

YDEEVNE

Resultat af valideringsundersøgelse:

Klamydia: Sensitivitet: 98,7 % Specificitet: 99,9 % Sikkerhed: 99,5 %

Rapportering af fare

I tilfælde af fare bedes du kontakte support@dynamiccode.com

Advarsel Guanidinium klorid



Hav emballagen eller etiketten til rådighed, hvis du skal søge lægehjælp.

Ved indånding: Frisk luft og hvile. Hvis symptomerne vedvarer, søg læge.

Ved kontakt med huden: Tag tilsølet tøj af, vask huden med sæbe og vand. Hvis der opstår symptomer, kontakt læge.

Ved kontakt med øjnene: Fjern om muligt straks eventuelle kontaktlinser. Skyl øjet i flere minutter med lunkent vand. Kontakt læge, helst øjenspecialist, hvis irritation vedvarer.

Ved indtagelse: Skyl først munden nøje med rigeligt vand, og SPYT skyllevandet UD. Drik derefter mindst en liter vand og kontakt læge. Fremkald IKKE OPKASTNING.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Skadeligt ved indtagelse.

Irriterer hud.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Skadeligt ved indånding.

0,4 ml e

UFI: 5110-E07D-N00K-JFAP

FORKLARING PÅ SYMBOLER

 Producent

 Distributør

 Produkterne er CE-mærket

 In vitro diagnostik produkt

 Læs instruktionerne

 Engangsprodukt

 2°C / 30°C

 Opbevaringstemperatur 2-30 grader

 Guanidinium klorid