

apotekets

TEST FOR KØNSSYGDOMME TIL KVINDER

Apotekets test tager blot nogle få minutter at gennemføre, og testen sendes derefter til analyse i laboratoriet hos Dynamic Code. Du får svar på, om testen indeholder nogen af bakterierne *C. trachomatis*, *M. genitalium*, *N. gonorrhoeae* og/eller parasitten *T. vaginalis*, som forårsager henholdsvis klamydia, mykoplasma, gonoré og trikomonas. Ved positivt testresultat for mykoplasma, M. genitalium, foretages desuden en resistensvurdering.

Det er vigtigt at behandle en påvist infektion hurtigst muligt for at undgå komplikationer.

BEMÆRK! I tilfælde af et positivt testresultat for gonorré skal du møde op fysisk hos en læge for yderligere behandling.

VIGTIGT

- Vent mindst 14 dage efter det mistænkte smittetilfælde, før du udfører testen.
- Udfør ikke testen ved menstruation eller direkte efter samleje.
- Send testen tilbage samme dag, som du har taget den.
Hvis du skal opbevare prøven i et stykke tid, gøres det ved stuetemperatur.
- Undgå at poste den dagen før en weekend eller en helligdag, da der ikke leveres post i weekender og på helligdage.
- Testen skal udføres med det samme, når testkitemballagen er blevet brudt.
- Hvis testmaterialet er beskadiget, skal det ikke anvendes.
Henvend dig på apoteket, hvor du købte testen og få en ny.
- Gem din aktiveringsetiket med analysekoden. Du skal indtaste din analysekode for at få dit testsvar.
- Testsvaret er kun gyldigt, hvis testen er taget på den rigtige måde iht. brugsanvisningen.
- Anbefales fra 16 år.

INDHOLD



Brugsanvisning



Testrør med testpind




Lynlåspose



Aktiveringsetiket med QR-kode og analysekode

BRUGSANVISNING

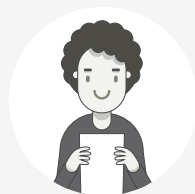

01 GENNEMLÆS BRUGSANVISNINGEN

Begynd med at vaske og tørre hænderne omhyggeligt.

Læs hele brugsanvisningen igennem, inden du påbegynder testen, så du ikke overser noget vigtigt.



02 AKTIVÉR TESTEN


Aktivér din test samme dag, som du udfører testen. Test modtaget uden aktivering kasseres med det samme.

- Tag testrøret frem.
- Riv aktiveringsetiketten af ved den perforerede linje over den gule stribe. Sørg for at resten af etiketten bliver siddende på testrøret, da testen ellers ikke kan identificeres ved ankomsten til laboratoriet.
- Scan QR-koden, der findes på aktiveringsetiketten. Alternativt kan du indtaste analysekoden på www.dynamiccode.com.
- Følg onlineinstruktionerne.
- Gem aktiveringsetiketten.




03 GEM AKTIVERINGSETIKETTEN

Vigtigt! Gem aktiveringsetiketten. Den indeholder din analysekode, som du skal bruge for at hente dit testsvar.

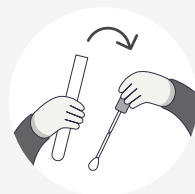


04 FORBERED TESTEN

Vrid proppen af testrøret, og pas på ikke at berøre den bløde del af testpinden.

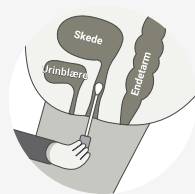


05 UDFØR TESTEN

Før testpinden cirka 5 cm ind i skeden. Tryk den bløde del af testpinden mod skedevæggen, samtidig med du drejer den 4 til 6 gange.

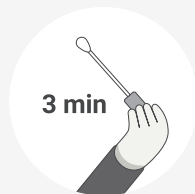

06 UDFØR LUFTTØRRING

Lad testpinden tørre i mindst 3 minutter. Den bløde del må ikke berøre noget.

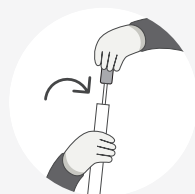

07 LUK TESTEN TIL

Sæt testpinden tilbage i røret, og tryk proppen godt fast. Nu er testen gennemført!



08 PAK TESTEN I ÆSKEN

- Læg testrøret i lynlåsposen, og luk den til.


Vigtigt! Kom ikke aktiveringsetiketten i æsken. Gem aktiveringsetiketten med din analysekode for at hente dit testsvar.

- Kom lynlåsposen med testen i æsken.
- Fold lågets flapper ind, luk igen, og lås æsken.



09 RETURNÉR TESTEN

Returnér den frankerede æske ved at aflevere den til et PostNord indleveringssted.

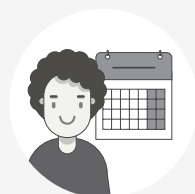

10 AFVENT SVAR

Scan QR-koden. Alternativt kan du indtaste analysekoden på www.dynamic-code.com.

QR- og analysekoden findes på aktiveringsetiketten.

Hvis du har indtastet dit telefonnummer, da du aktiverede din test, vil du modtage en SMS-besked, når dit resultat er klar.

YDEEVNE

Resultat af valideringsundersøgelse:

Klamydia:	Sensitivitet: 100 %	Specificitet: 99,7 %	Sikkerhed: 99,8 %
Gonorré:	Sensitivitet: 100 %	Specificitet: 99,2 %	Sikkerhed: 99,5 %
Mykoplasma:	Sensitivitet: 100 %	Specificitet: 100 %	Sikkerhed: 100 %
Trikomonas:	Sensitivitet: 99 %	Specificitet: 95 %	Sikkerhed: 99 %
Resistensvurdering (makrolid):	Sensitivitet: 100 %	Specificitet: 94 %	Sikkerhed: 96 %

Rapportering af fare

I tilfælde af fare bedes du kontakte support@dynamiccode.com

FORKLARING PÅ SYMBOLER

 Producent

 Distributør

 Produkterne er CE-mærket

 In vitro diagnostik produkt

 Læs instruktionerne

 Engangsprodukt

 Opbevaringstemperatur 2-30 grader