

FUNGE X

Læs indlægseddlen grundigt, før du bruger FungeX neglesvampebørste. Smid ikke denne indlægseddle ud.

NEGLESVAMP BØRSTE

DK FUNGEX NEGLESVAMP BØRSTE

Klinisk dokumenteret effekt ved neglesvamp.

Tilsetigt formål: FungeX Neglesvamp børste er et medicinsk udstyr beregnet til brug ved behandling og forebyggelse af neglesvamp (onykomykose).

Anvendelse: FungeX Neglesvamp børste:

- Klinisk dokumenteret effekt ved neglesvamp
- Hjælper med at reducere risikoen for spredning og geninfektion
- Hjælper med at forbedre neglernes udseende (svækkede, rillede, fortykkede, ru eller misfarvede)
- Plejer og fugter neglene
- Understøtter neglens naturlige styrke og udseende
- Tørrer hurtigt og er usynlig – diskret til daglig brug.

Om neglesvamp: Svampeinfektion i neglene (onykomykose):

- Er en af de mest almindelige neglelidelser
- Starter ofte som en hvid eller gul plet under neglen
- Kan medføre fortykkelse, svækkelse af neglen, riller eller misfarvning
- Kan sprede sig til andre negle og smitte andre i fællesområder (fx svømmebassiner og fitnesscentre).

Sådan fungerer FungeX: FungeX kombinerer svampedræbende virkning med neglepleje:

- **Beskyttende lag:** Skaber et miljø, der hæmmer svampevækst
- **Barrierefunktion:** Hjælper med at reducere risikoen for spredning og geninfektion
- **pH-effekt:** Reducerer neglens surhedsgrad og bremser svampeudviklingen
- **Indeholder squalane,** som understøtter et glattere og sundere udseende af neglene.

Brugsanvisning: Kun til udvortes brug. Påføring på børn skal foretages af en voksen.

- Rengør og tør den/de berørte negl(e).
 - Påføres én gang dagligt med præcisionsbørsten. Dæk hele neglens overflade og underside, hvis muligt.
 - Lad tørre i 1–2 minutter.
 - Sæt låget tæt på flasken efter hver brug.
- Fortsæt den daglige anvendelse, indtil den inficerede negl er vokset helt ud. Kan også bruges forebyggende på sunde negle. Børsten forbliver ren og forhindrer spredning af svamp. Kan anvendes sammen med oral svampedræbende behandling, hvis det er ordineret.

Tip: Vedholdenhed er vigtigt. Hvis du stopper for tidligt, øges risikoen for tilbagefald.

Hvis symptomerne fortsætter eller forværres, skal du kontakte en læge.

Gode råd til forebyggelse:

- Hold fødderne tørre, især mellem tæerne
- Brug bomulds- eller uldsokker, og skift dem dagligt
- Undgå at dele negleklipper, sko eller håndklæder med andre
- Gå ikke barfodet i fællesområder.

Anvendelse under graviditet og amning: Der foreligger ingen sikkerhedsdata. Hvis du er gravid eller ammer, kontakt din læge eller dit apotek før brug.

Kontraindikationer: Må ikke anvendes, hvis du er allergisk over for nogen af de anførte ingredienser. Må ikke påføres på åbne sår eller beskadiget hud på grund af risikoen for irritation eller infektion. Kontakt læge før brug, hvis du har diabetes, nedsat cirkulation eller et svækket immunsystem.

Mulige bivirkninger: Sjældne: rødme, irritation, kløe, hævelse, smerter, at neglen løsner sig eller allergiske reaktioner (fx udslett). Hvis der opstår en allergisk reaktion, skal du straks afbryde brugen og kontakte læge.











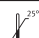
ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjne og slimhinder. Må ikke påføres på åbne sår eller beskadiget hud. Læg ikke stram bandage, og anvend ikke varme på det behandlede område. Undgå at udsætte de behandlede negle for stærkt sollys umiddelbart efter påføring.

Opbevaring: Opbevares tørt ved stuetemperatur (5–25 °C). Undgå indånding af dampe. Opbevares utilgængeligt for små børn. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på emballagen.

Indeholder: 1 FungeX Neglesvampebørste med 5 ml opløsning. En flaske med 5 ml rækker til ca. 250 påføringer og er tilstrækkelig til flere måneders daglig brug på én påvirket negl.

Ingredienser: Ethyl Lactate, Glycerin, Aqua, Lactic Acid, Biotin

SYMBOLFORKLARING Advarselsmærkerne og symbolerne på emballagen og i brugsanvisningen er vigtige for at sikre, at du bruger dette produkt sikkert og korrekt, og for at beskytte dig og andre mod skader. Symbolerne er forklaret i tabellen nedenfor:

Symbol	Forklaring
	Angiver fremstilleren
	Angiver, at brugsanvisningen skal læses
	Angiver, at man skal udvise forsigtighed ved brug af anordningen
	Angiver udløbsdatoen
	Angiver, at produktet er et medicinsk udstyr
	Angiver den unikke enhedsidentifikator (Unique Device Identifier – UDI)
	Angiver batchnummer
	Ikke egnet til børn på 4 år og derunder
	Opbevares utilgængeligt for børn
	Ikke egnet til gravide eller ammende kvinder
	Produktet skal opbevares mellem 5–25 °C

Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med dette produkt, skal rapporteres til producenten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren er bosat.

Bortskaf emballagen og de brugte dele i overensstemmelse med de gældende nationale regler.

Du kan finde flere oplysninger om FungeX på www.fungex.com. Kontakt distributøren, hvis du har spørgsmål vedrørende produktet.

Producent
TheOTCLab
Fred Roeskestraat 115,
1076 EE Amsterdam
Holland
www.theotclab.com

Distributør
Bräuner FMCG
Birkmosevej 20D, 1. th,
6950 Ringkøbing
Danmark
www.brauner-fmcg.com

 **0482**
V9773815
26A1_202510

WWW.FUNGEX.COM

FUNGE X

Läs bipacksedeln noggrant innan du använder FungeX nagelsvampborste. Släng inte denna bipacksedel.

NAGELSVAMPBORSTE

SE FUNGEX NAGELSVAMPBORSTE

Kliniskt dokumenterad effekt vid nagelsvamp.

Avsett ändamål: FungeX Nagelsvampborste är en medicinteknisk produkt avsedd att användas för behandling och förebyggande av nagelsvamp (onykomykos).

Användning: FungeX Nagelsvampborste:

- Kliniskt dokumenterad effekt vid nagelsvamp
- Hjälper till att minska risken för spridning och återinfektion
- Hjälper till att förbättra naglarnas utseende (försvagade, räfflade, förtjockade, ojämna eller missfärgade)
- Vårdar och återfuktar naglarna
- Stödjer naglarnas naturliga styrka och utseende
- Torkar snabbt och är osynlig – diskret för daglig användning.

Om nagelsvamp: Svampinfektion i naglarna (onykomykos):

- Är en av de vanligaste nagelsjukdomarna
- Börjar ofta som en vit eller gul fläck under nageln
- Kan leda till förtjockning, skörhet, räfflor eller missfärgning
- Kan sprida sig till andra naglar och smitta i gemensamma utrymmen (t.ex. simbassänger och gym).

Så fungerar FungeX: FungeX kombinerar svampbegränsande effekt med nagelvård:

- **Skyddande skikt:** skapar en miljö som hämmar svamp tillväxt
- **Barriärfunktion:** bidrar till att minska risken för spridning och återinfektion
- **pH-effekt:** minskar nagelns surhetsgrad och bromsar svamp tillväxten
- **Innehåller squalane** som stödjer ett slätare och hälsosammare utseende av naglarna.

Bruksanvisning:

Endast för utvärtes bruk. Applicering på barn ska utföras av en vuxen.

- Rengör och torka den/de berörda nageln/naglarna.
- Applicera en gång dagligen med precisionsborsten. Täck hela nagelns yta och undersida om möjligt.
- Låt torka i 1–2 minuter.
- Stäng flaskan ordentligt efter varje användning.

Fortsätt daglig användning tills den infekterade nageln har vuxit ut helt. Kan även användas förebyggande på friska naglar. Borsten förblir ren och förhindrar spridning mellan naglarna. Kan användas tillsammans med oral svampbehandling om sådan ordinerats.

Tips: Uthållighet är nyckeln. Om du slutar för tidigt ökar risken för återfall.

Kontakta läkare om symtomen kvarstår eller förvärras.

Förebyggande råd:

- Håll fötterna torra, särskilt mellan tårna
- Använd bomulls- eller ullstrumpor och byt dem dagligen
- Dela inte nagelklippare, skor eller handduk med andra
- Gå inte barfota i gemensamma utrymmen.

Användning under graviditet och amning: Det finns inga säkerhetsdata. Om du är gravid eller ammar, kontakta läkare eller apotek före användning.

Möjliga biverkningar:

- Får inte användas om du är allergisk mot någon av de angivna ingredienserna.
- Får inte appliceras på öppna sår eller skadad hud på grund av risk för irritation eller infektion.
- Kontakta läkare före användning om du har diabetes, nedsatt cirkulation eller nedsatt immunförsvar.

Kontraindikationer: Sällsynta: rodnad, irritation, klåda, svullnad, smärta, att nageln lossnar eller allergiska reaktioner (t.ex. utslag). Vid allergisk reaktion – avsluta användningen omedelbart och kontakta läkare.



VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon och slemhinnor. Får inte appliceras på öppna sår eller skadad hud. Applicera inte hårt åtsittande förband och använd inte värme på det behandlade området. Undvik att utsätta behandlade naglar för direkt starkt solljus omedelbart efter applicering.

Förvaring: Förvaras torrt vid rumstemperatur (5–25 °C). Undvik inandning av ångor. Förvaras oåtkomligt för små barn. Används inte efter utgångsdatum.

Innehåller: 1 FungeX Nagelsvampborste med 5 ml lösning. En flaska med 5 ml räcker till cirka 250 appliceringar och är tillräcklig för flera månaders daglig användning på en drabbad nagel.

Ingredienser: Ethyl Lactate, Glycerin, Aqua, Lactic Acid, Biotin

SYMBOLFÖRKLARING Varningssymboler och symboler på förpackningen och i bruksanvisningen är viktiga för att säkerställa säker och korrekt användning. Symbolerna förklaras nedan:

Symbol	Explanation
	Anger tillverkaren
	Anger att bruksanvisningen ska läsas
	Anger att försiktighet ska iakttas vid användning
	Anger utgångsdatum
	Anger att produkten är en medicinteknisk produkt
	Anger unik enhetsidentifierare (UDI)
	Anger batchnummer
	Ej lämplig för barn 4 år och yngre
	Förvaras oåtkomligt för barn
	Ej lämplig för gravida eller ammande kvinnor
	Produkten ska förvaras mellan 5-25°C

Allvarliga tillbud som har inträffat i samband med denna produkt ska rapporteras till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren är bosatt.

Kassera förpackningen och de använda delarna i enlighet med gällande nationella bestämmelser.

Du hittar mer information om FungeX på www.fungex.com. Kontakta distributören om du har frågor om produkten.



Tillverkare
TheOTClab
Fred Roeskestraat 115,
1076 EE Amsterdam
Holland
www.theotclab.com

Distributör
Bräuner FMCG
Birkmosevej 20D, 1. th,
6950 Ringkøbing
Danmark
www.brauner-fmcg.com

CE 0482

V9773815
26A1_202510

WWW.FUNGEX.COM