

Ice Pack AssistCo.

BRUGSANVISNING (IFU)

Sådan anvender du ICE-PACK

Lokaliser den indvendige pose, og klem den i stykker.

Ryst posen, så indholdet blandes godt.

Læg ICE-PACK på skadestedet så hurtigt som muligt med et underlag – må ikke lægges direkte på huden pga. risiko for frostskafer.

Fastgør med elastisk bind for optimal effekt.

Anvendelsestid: Op til 30 minutter.

Effekt

Hurtig behandling i de første minutter er afgørende.

Afkøling reducerer hævelser og smerter.

Gentages hver tredje time ved behov.

ICE-PACK er klar til brug uden forudgående afkøling og former sig efter underlaget.

Efter brug

Bland indholdet med 1 liter vand.

Brug 1 dl til 10 liter vand.

Kan anvendes som gødning til græsplæner og blomsterbede.

Indhold

Nitrogenholdige salte og vand.

Førstehjælp

Indånding: Frisk luft, ro og varme.

Hudkontakt: Vask med sæbe og vand.

Øjenkontakt: Skyl i op til 15 minutter.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Drik vand eller mælk.

Generelt: Søg læge ved tvivl.

Advarsler

Stik ikke hul på posen. Kun til udvortes brug.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Forsigtighed ved børn, diabetikere og dårlig blodcirkulation.

Opbevares ved 0–45 °C.