

# Brugsvejledning

## pH-stave / Indikatorpapir



1. Tag forsigtigt en pH-stav ud af beholderen. Undgå at berøre selve målefelterne (farvezonerne) med fingrene.
2. Dyp pH-stavens målefelter / indikatorpapiret ned i den væske som ønskes målt i ca. 1-3 sekunder.
3. Ryst staven let for at fjerne overskydende væske - bank evt. staven let mod prøvebægerets kant.
4. Vent ca. 3-5 sekunder indtil farven på målefelterne / indikatorpapiret er stabiliseret.
5. Aflæs resultatet ved at sammenligne pH-stavens / indikatorpapirets farve med beholderens farveskala. Find den farve, der matcher bedst og aflæs den tilhørende pH-værdi.

**pH < 7:** Sur (f.eks eddike)

**pH 7:** Neutral (f.eks rent vand)

**pH > 7** Basisk/alkalisk (f.eks sæbevand)

Tips til større nøjagtighed:

Brug aldrig den samme stav 2 gange. Opbevar stavene / indikatorpapiret i den tætsluttende beholder, da de er følsomme over for luftfugtighed.

Distributør:



**My Medical** A/S

Gl. Viborgevej 13g-h

DK-8381 Tilst