



# ProFast<sup>super</sup>

Rengörings/RengjøringsTabletter


1

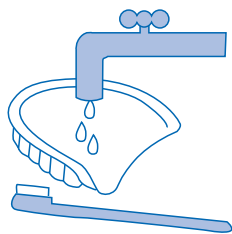

2

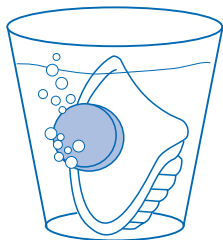

3

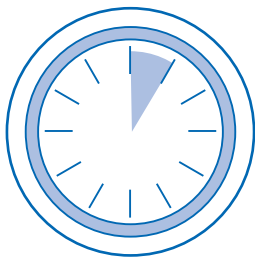

Sodium Perborate, Sodium Bicarbonate, Potassium Monopersulphate, Trisodium Phosphate, PEG-240, Sulphamic Acid, PVP, TAED, Silica, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, Cellulose-Lactose, Colour C.I. 42090, Aroma

INGREDIENSER (INCI):

EKULF 2012-11-22

## NORGE

### Bruksanvisning

1. Børst protesen under rennende vann med en protesebørste.
2. Legg en ProFast rensetablett i et protesekar eller et glass og fyll i litt varmt vann så tablettene oppløses.
3. Legg protesen eller tannreguleringen i løsningen i minst 5 minutter. Protesen kan også ligge i oppløsningen natten over om man har brukt et tykkere lag ProFast fixativ.

Skyll protesen eller tannreguleringen under rennende vann. Protesen må være tørr før applisering av ProFast fixativ eller ProFast Specialtape.

#### Observer!

- Oppbevares i romstemperatur
- Utilgjengelig for barn
- Må ikke spises

Tlf: 69 15 30 00

[www.EKULF.com](http://www.EKULF.com)

## SVERIGE

### Bruksanvisning

1. Borsta protesen under rinnande vatten med en protesborste.
2. Lägg en ProFast Rengöringstablett i en protesask eller i ett glas med varmt vatten så tablettene löses upp.
3. Blötlägg protesen eller tandställningen i minst 5 minuter. Protesen kan även ligga i upplösningen över natten om man har använt ett tjockare lager av ProFast fixativ.

Skölj protesen eller tandställningen under rinnande vatten. Torka protesen ordentligt före applicering av ProFast Fixativ eller ProFast Specialtape.

#### Observera!

- Förvaras i rumstemperatur
- Förvaras oåtkomligt för barn
- Ska ej förtäras

Tlf: 011-14 40 30

[www.EKULF.com](http://www.EKULF.com)

## DANMARK

### Brugsanvisning

1. Børst protesen under rindende vand med en protesebørste. Hursk vand i vask.
  2. Læg en ProFast tablet i en protese eller i et glas. Kom lidt varmt vand i så tablettene opløses.
  3. Læg protesen eller bøjlen i blød i opløsningen i mindst 5 minutter. Ved tykkere lag ProFast kan længere tid være nødvendig, f.eks. kan protesen ligge i opløsningen natten over.
- Skyll protesen eller bøjlen under rindende vand. Tør protesen godt inden påføring af ProFast fixativ eller ProFast Specialtape.

#### Observer!

- Opbevares ved stuetemperatur
- Utilgængeligt for børn
- Må ikke spises

Tlf: 45 82 08 22

[www.EKULF.com](http://www.EKULF.com)